


# 入浴時には必ずポンプを 取り外してください。



## 重要 ポイント


- 入浴するとき、およびシャワーを浴びるときは、ポンプを取り外し、保護カバーを取り付けてください。
- 取り外したポンプの、ポンプ本体とカートリッジの接続を無用に外さないでください。
- 水濡れ、または水没したポンプは使用しないでください。
- メディセーフウィズスマートのポンプ本体、およびリモコンは、防滴仕様のため、少量の雨や、汗程度は問題ありませんが精密機器のため、水濡れにご注意ください。

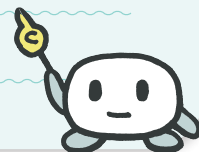

水没等のお取扱い上の不注意によって故障した場合は、保証規定の対象外となります。

## ポンプ 取り外し忘れ 注意喚起 ステッカー

お風呂場の扉等に貼って、  
取り外しを忘れない様にしましょう。  
(弱粘性の防水シールです)

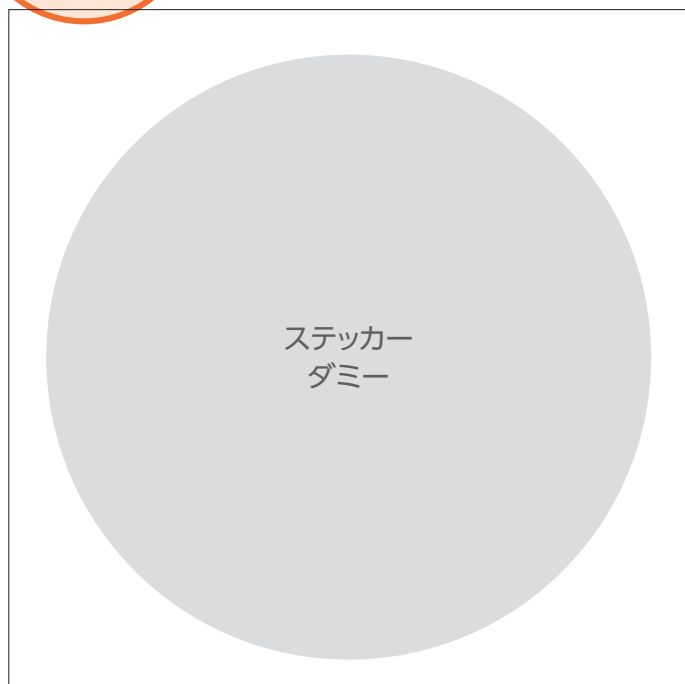

ポンプを取り外した際は、  
必ず保護カバーを装着してください。



保護カバー装着についての詳細は、裏面をご確認ください。

## ポンプ着脱時の注意点




入浴時等にホルダーからポンプを取り外した際は、タオルや衣類等がガイドに引っかからないようにご注意ください。また、必ずホルダーに保護カバーを付けてください。

●タオルや衣類等がガイドに引っかかり、貼付テープがはがれることがあります。また、留置セットのゴムポート部を引っかけて破損することがあります。

ガイドにタオルや衣類等が引っかからないように注意


ポンプを外す際は、必ず保護カバーを付ける

入浴後はゴムポートの凹部分に水滴が残りやすいため、必ずゴムポートをアルコール綿等で拭く

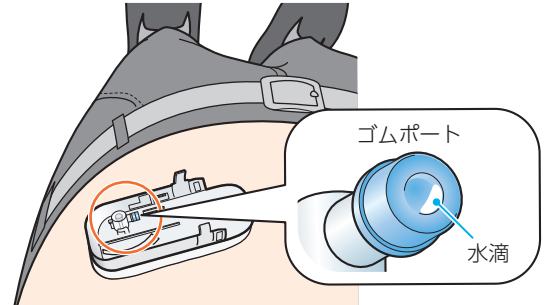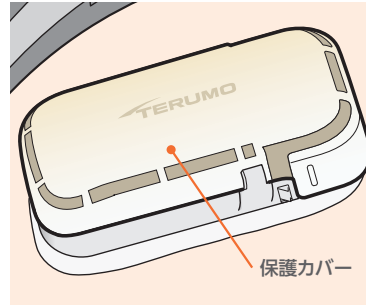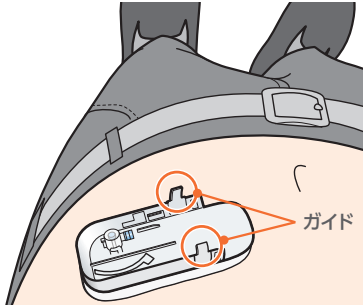


## ポンプを一時的に取り外す


1 基礎レートを一時停止する

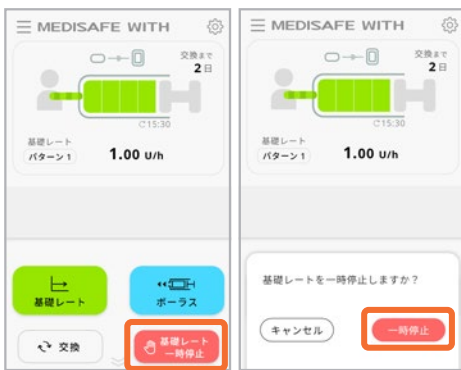

2 ポンプの取りはずしボタンを押しながら、イーザーパッチのホルダーから取り外す

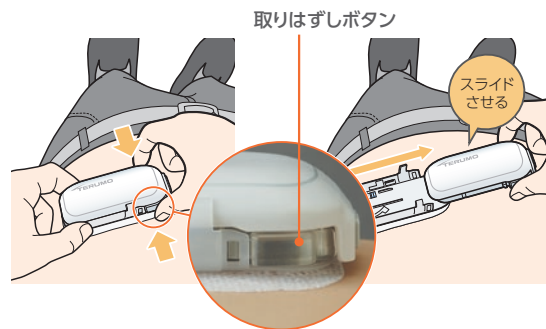

3 保護カバーをホルダーにスライドして装着する

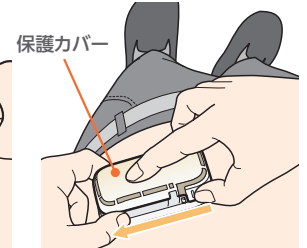


●ポンプを外したときは、必ず保護カバーを取り付けます。

注意 一時停止せずに取り外すと、「ポンプ外れアラート」が発生します。


## 一時的に取り外したポンプを再度装着する

●保護カバーは防水ではありません。入浴やプールに入った後は、ゴムポート部分をアルコール綿等で消毒してください。


1 保護カバーの取りはずしボタンを押しながら、ホルダーから取り外す

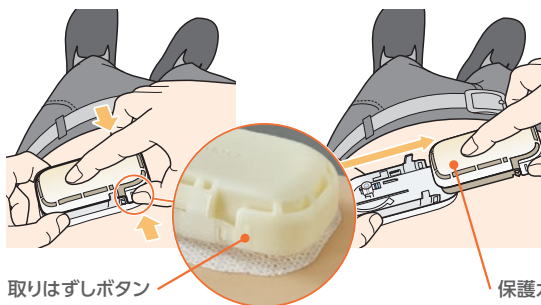

2 ゴムポート部分を消毒する

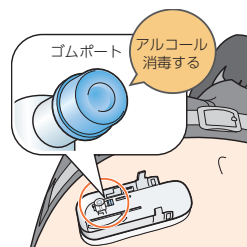

3 ポンプをホルダーに挿入する

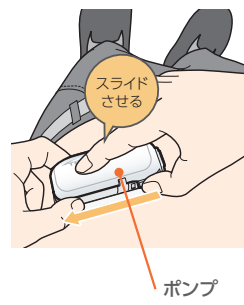

4 [基礎レート再開]をタッチ



注意 ポンプの装着忘れ、基礎レートの再開忘れにご注意ください。基礎レートが停止してから15分ごとにアラートでお知らせします。

